

Verticalisateur Esri Blue Wayup à base mécanique (lève-personne actif)



Spécifications (techniques) :

- poids maximal du patient 150kg
- dimensions (l x h x p) : 92 x 130 x 75 cm
- écartement mécanique des pieds de 75cm à 92 cm.
- poids : 33kg
- temps de chargement 3 à 4 heures

Description :

Un confort vertical optimal

Le Blue Wayup est un lève-personne compact et facile à utiliser qui permet un transfert aisé de la plupart des patients.

Il est conçu pour les patients à mobilité réduite mais qui peuvent encore s'appuyer temporairement sur une jambe au moins (une tension musculaire minimale du patient est exigée) et qui ont besoin d'une aide mécanique pour se mettre debout et pour être déplacés. Surtout pour simplifier le transfert d'un lit à un siège ou d'un siège à siège de toilette.

Instructions d'utilisation :

Batteries

- Veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée au préalable.
- Afin de ne pas être confronté à des problèmes inattendus, nous vous recommandons de charger l'appareil la nuit, par exemple. Il n'y a pas de risque à ce que la batterie reste plus longtemps dans le chargeur que nécessaire à son chargement.
- Vous pouvez voir sur l'écran à l'avant de la batterie si celle-ci est chargée.
- Veillez à ce que l'appareil ne fonctionne pas pendant qu'il est en charge

Sécurité

- Le lève-personne est équipé de freins à pression sur les roues. En appuyant sur ceux-ci vers le bas, le lève-personne ne peut plus être déplacé.
- Une pédale est présente en bas du lève-personne. En appuyant sur celle-ci avec le pied, la base s'étend, ce qui améliore la stabilité. Si vous appuyez ensuite sur l'autre côté de cette pédale, la base se referme.
- À l'avant de la batterie, vous trouverez un bouton d'arrêt d'urgence rouge. Si vous appuyez dessus, le lève-personne arrête immédiatement de monter ou de descendre. Ainsi, des problèmes peuvent être évités en cas d'urgence. Verrouillez à nouveau le bouton d'arrêt d'urgence en tirant dessus.
- Le verticalisateur est destiné à soulever des gens. Ne l'utilisez pas à d'autres fins
- Vérifiez si le poids du patient n'est pas supérieur au poids maximal qui peut être soulevé par le verticalisateur
- Utilisez le verticalisateur en appuyant sur les poignées, jamais en poussant le patient. Utilisez le verticalisateur sur des surfaces planes et lisses. N'utilisez pas de verticalisateur électrique dans une douche.

Utilisation d'une ceinture ou d'une toile pour le patient

Remarque préalable : Il est vivement recommandé de ne faire utiliser le lève-personne que par du personnel soignant qualifié. Le service de prêt n'est pas responsable des accidents qui découlent de la mauvaise utilisation de cet appareil !

- Avec un lève-personne actif, vous pouvez **uniquement passer d'une position assise à une position assise**. Il est impossible de se lever d'une position couchée avec un lève-personne actif.
- Lorsque vous êtes assis, le/la soignant(e) vous fait une **sangle de levage**. Celle-ci passe sous vos aisselles et elle est fixée autour de votre torse avec une sangle de poitrine. Le/la soignant(e) fixe la sangle au lève-personne au moyen de deux boucles.
- Placez vos jambes sur le repose-pieds du lève-personne, vos tibias reposent contre le support pour les jambes.
- Saisissez le lève-personne à deux mains.
- Le/la soignant(e) vous fait lever tranquillement et vous déplace ensuite avec le lève-personne vers votre siège/siège de toilette/fauteuil/lit où il/elle vous installe.
- Étant donné que le bas de votre corps reste libre, c'est facile d'enfiler ou de retirer éventuellement des sous-vêtements pour aller aux toilettes.

Nettoyage/entretien :

- Tous les éléments mobiles sont autolubrifiants et donc sans entretien.
- Bien que les lève-personnes soient munis d'une couche de vernis durable, ceux-ci ne doivent en aucun cas être nettoyés avec des produits agressifs (abrasifs).
- Un chiffon humide suffit au nettoyage après une utilisation quotidienne.
- Une fois la période de prêt terminée, l'appareil est désinfecté au service de prêt par du personnel qualifié.
- La (les) ceinture(s) fournie(s) (écharpe) peu(ven)t être lavée(s) en machine à 60°C.